

ストーマライフを快適に！

ミムロ入浴用パウチ保護フィルム

こんなことでお困りではないですか？

人目が気になって旅行に行けない…
入浴時にテープを貼るのが煩わしい…
テープを貼ると破れてしまう…
安心してのんびり湯船につかりたい…

その悩み解決いたします！




★パウチの種類を問わず簡単に覆い隠すことができます。
パウチにくっつきにくいPVCフィルムを使用。

透けない厚さ80ミクロン

パウチを目立ちにくくする、透けないシートタイプ。
周りを気にせず安心してご使用いただけます。
サイズもタテ22cm×ヨコ20cmと少し大きく、厚みがあるので簡単に貼付できます。


装着方法

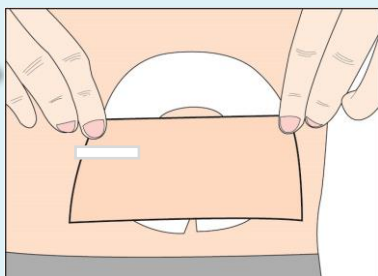

パウチを小さく折りたたみ、
付属のクリップで止めます。



付属クリップ

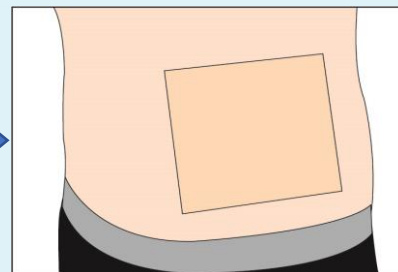

次に、シートの中央にパウチが
くるように貼り付けて完了。

商品名	ミムロ入浴用パウチ保護フィルム
仕様	透けないタイプ
商品コード	410
サイズ	22cm×20cm 80ミクロン
商品容量	10枚入
定価	2,200円（税別価格）

【ご使用上の注意】

- ご使用の際はなるべくしわが寄らないように貼って下さい。貼り方によっては浸水してしまう場合がございます。
- パウチの中の空気がふくらむ場合がございますが、そのままご入浴下さい。無理に上から押さえると浸水してしまう恐れがあります。
- 本品は使い捨て製品となっております。
- ストーマ装具を使用せずに本製品単体でのご入浴時の使用はおやめ下さい。
- パウチの状態によっては、剥がした時にパウチの破損等が起こる恐れがあります。
- 本品は給付金の対象にならない場合があります。
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみなどの皮膚症状が現れた場合にはただちに使用を中止し医師の診察を受けて下さい。



製造元



株式会社



販売代理店

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16 2F

TEL: 043-307-5020 FAX: 043-307-5028

URL: <https://www.stoma-belt.jp/> E-mail: info@mimuro.jp