


ミムロオーガニッククリックベルト

皮膚と装具の密着性を高め、面板が密着しにくい方や外出時に最適です。

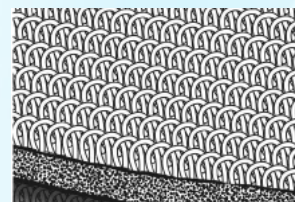


特長


- ・従来のフタタッチベルトクリップに比べ耐久性が高い
- ・両側からサイズ調整が出来るためパウチにかかる張力を左右均一に出来る
- ・タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応
- ・肌面側がオーガニックコットンを使用したパイル織のため肌あたりが優しい
- ・両側からマジックで簡単にサイズ調整が可能

装着方法


- ① クリップの根元部分を左手で持ち、右手で上ブタを上に戻します。

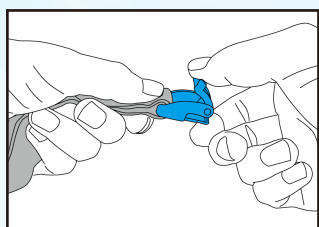


- ② クリップ本体と上ブタの間のスキマにパウチのタブを入れます。

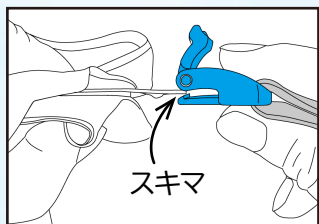


- ③ パウチのタブをクリップ受け部に当たるまで挿入します。

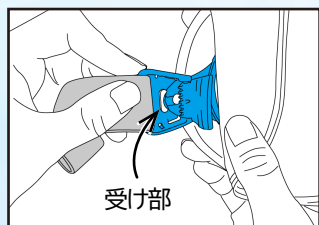


- ④ 上ブタを閉めます。

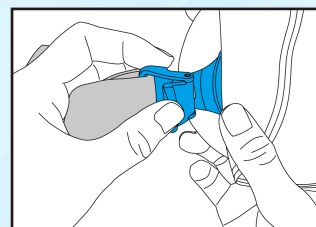

- ⑤ クリップがしっかりとパウチのタブを押えているか、引っ張って外れないか確認して下さい。もう片方も同様に留めて下さい。

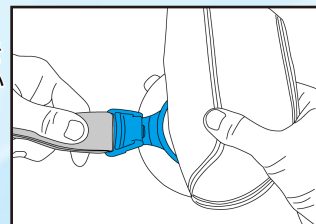

- ⑥ クリップを持ち、もう一方の手でベルトを胴回りに合わせて調整して下さい。ベルト折り返し部の長さを左右均一にして下さい。

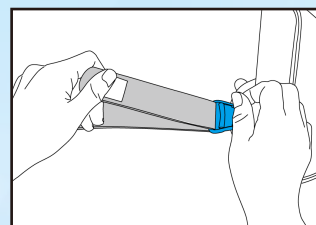

使用目的 タブ付きの装具と一緒に使用する事で皮膚と装具の密着性を高め装具の剥がれや漏れの防止に効果が期待できます。

使用上の注意

- ・ベルト部が接する部位の皮膚に傷や疾患のある方は使用しないでください。
- ・使用目的以外の用途には使用しないでください。
- ・ご使用中またはご使用後に気分が悪くなったり、発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し医師または看護師にご相談ください。

ご注意：未使用の状態では上ブタの開閉が硬くなっていますが、一度開けると、以降の開閉がスムーズにできるように設計されています。

品番	仕様	ベルト巾	ベルト長さ	カラー	クリップ部品質	ベルト部品質	価格
OG320		3 cm	90cm	グレー	ポリアセタール	綿(オーガニック)・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン	1,320円(税込)

製造元



〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16
TEL 043-307-5020 FAX 043-307-5028
<https://www.stoma-belt.jp/>
E-mail: info@mimuro.jp

販売代理店

