

# ミムロそけいベルト(脱腸帯)

一般医療機器 届出番号：12B2X10012000005

## 肌触りの良い素材・自由なサイズ調節で快適な付け心地



### 特長

- ・ 肌面のベルト素材はオーガニックコットンで、パイル織りのため優しい肌あたりになっています
- ・ ベルトはマジック織りのため自由にサイズが調整できます
- ・ ズレ防止ベルト（細い股下のベルト）も、ヘルニアの位置や体形により自由にサイズ調整が可能です
- ・ ポリエチレン樹脂を基材としたスポンジは柔軟・緩衝・断熱・耐熱性に優れ、肌に優しい作りになっています
- ・ スポンジは吸水しないため手洗いが可能、ハサミでカットしてご自身のサイズに調整することもできます

### 装着方法

1. ベルトは組み立てた状態で納品させていただいております。  
下着をはくように身につけ、ウエストベルトを締めてください
2. 仰向けに寝た状態でヘルニア部を静かに腹部の方へ揉み入れ、ご自身に合ったスポンジの数に調節しパッドを面板の裏側に装着してください（スポンジは3枚まで挿入可能）
3. ウエストベルトを腰回りサイズに合わせ、必要に応じてズレ防止ベルトも調整してください
4. ヘルニアがパッドできちんと押さえられているかご確認ください

実用新案登録 第3185127



4 571431 480137



	ベルト幅	ベルト長さ	腰回り適応範囲	カラー	価格
仕様	ウエストベルト： 5cm ズレ防止ベルト： 2cm	ウエストベルト： 95cm ズレ防止ベルト： 50cm	ウエストベルト： 65～120cm ズレ防止ベルト： フリー	面板：白 ベルト：アイボリー	10,780円 (税込)

総販売元  株式会社 **ミムロ**

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16  
TEL 043-307-5020 FAX 043-307-5028  
<https://www.stoma-belt.jp>  
E-mail: info@mimuro.jp

製造販売業者

株式会社 **豊栄**

〒277-0924 千葉県柏市風早1-8-9  
<https://www.k-houei.co.jp>

販売代理店