

皮膚と装具の密着性を高め、面板が密着しにくい方や外出時に最適

ミムロ センシュラ ミオ イージーベルト

コロプラスト センシュラ ミオ シリーズ タブ付きパウチの専用ベルト




装着方法および着脱方法
の動画はこちらから




装着方法


① 押して ② 開いて ③ 放すだけ
3ステップの簡単な操作でパウチにベルトを装着できます。

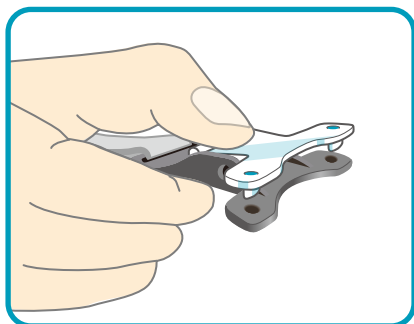

① バックルのレバーを押して爪のある先端部が、② 上下に開くようにします。

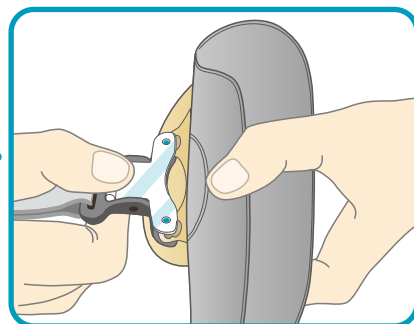

バックルの爪部の位置をパウチのタブ穴2ヶ所に合わせ、③ 押しているレバーを放して固定します。

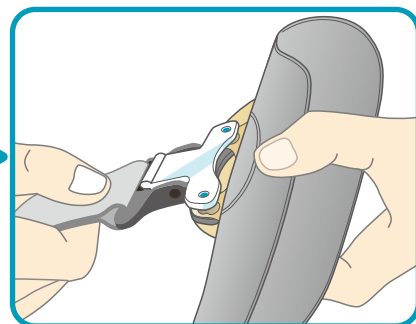

ベルトを引っ張りながら、バックル部がパウチにしっかり固定されているか確認します。

最後に、バックル部を片手でつかみ、もう一方の手でベルトを胴回りに合わせてサイズを調整して下さい。

外し方

① 先端の口が開くようにバックルのレバーを指で押して下さい。 ② レバーを押したままパウチから外して下さい。
反対側も同様な操作方法で外して下さい。

品番	ベルト幅	ベルト長	カラー	品質	税込価格
OG330	3cm	90cm	グレー	綿（オーガニック）・ナイロン・ポリエステル・レーヨン ポリウレタン・ポリアセタール・ポリカーボネイト	2,420 円

特許出願番号：2023-213003

ご使用上の注意

- ご使用中、圧迫などにより気分が悪くなったときなどは、すみやかに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。
- ご使用中またはご使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、すみやかに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

洗濯方法

- 液温は 40℃を上限とし手洗い（押し洗い）をしてください。
- 塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- アイロンの使用は避けてください。
- 洗濯後の乾燥は陰干しにしてください。

製造元

株式会社 **ミムロ**

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波 1-13-16
TEL. 043-307-5020 FAX. 043-307-5028

<https://www.stoma-belt.jp/>

E-mail : info@mimuro.jp



4 580454 854801